

arcad[®]



FOLLETO

ANTEPIE
MEDIO PIE
PIE TRASERO

Grapas compresivas para osteosíntesis
8/10/15/18/20/25 milímetros



. Sin control de temperatura .
Inserción rápida e intuitiva
Compresión dinámica .
Anclaje monocortical o bicortical .


*Creating
Better
Together™*



Fabricadas en Nitinol, las grapas compresivas de osteosíntesis están indicadas para la corrección de deformidades óseas (Hallux valgus, Deformidades de los radios menores, Deformidad del dedo en martillo, Coaliciones, Deformidad reumatoide del pie, Pie cavovaro, Pie plano) y el tratamiento de la rigidez de las articulaciones del pie (Hallux rigidus, Artritis del pie).

Diseñadas para facilitar una fijación rápida y sencilla, las grapas metálicas con memoria proporcionan compresión dinámica en el sitio de osteotomía y atrodesis.

¡Solución Arcad® !

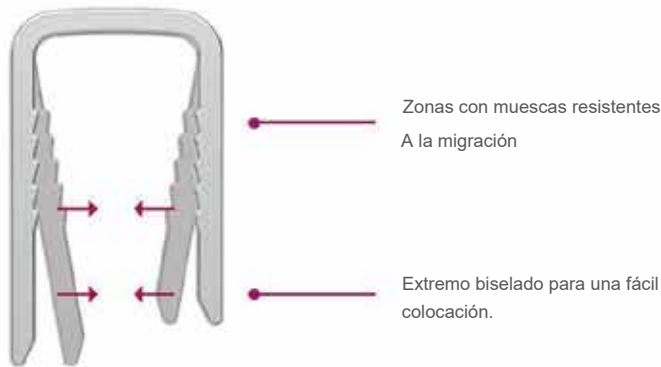

Características

Aleación con memoria de forma para una compresión inmediata y dinámica.

Sin gestión de temperatura.

La resistencia a la compresión se genera mediante tensión mecánica por medio de pinzas de inserción Arcad®.

Perfil bajo / contornos atraumáticos.

Efecto superelástico

El nitinol es una aleación compuesta por un 50 % de níquel y un 50 % de titanio. Los implantes de nitinol tienen la capacidad de volver a su forma original inmediatamente después de la descarga, lo que induce una compresión interfragmentaria dinámica e inmediata.



Rango

La gama de tamaños permite un ajuste preciso y compatibilidad anatómica.


- Opciones de ancho: 8 / 10 / 15 / 18 / 20 /

Díametro interior: 25 mm.

- Anclaje monocortical o bicortical fura.

Materia prima: Nitinol.

Soporte para la toma de decisiones sobre dimensionamiento - Ejemplo de tamaños por procedimiento*

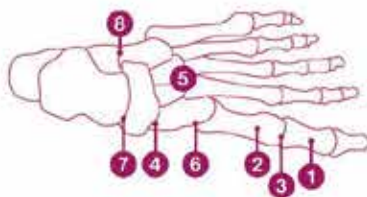

Antepié:

1. Osteotomía de Akin	08/10
2. Juanete	
3. Artrodesis MTP	15/18

Mediopié:

4. Artrodesis naviculocuneiforme	15/18
5. Artrodesis de Lisfranc	15/18
6. Artrodesis de Lapidus	15/18

Retropié:

7. Artrodesis talonavicular	20/25
8. Artrodesis calcáneo-cuboidal	20/25

Artrodesis MTP



Osteotomía de Akin



Artrodesis de Lisfranc



*Ejemplo de elección de tamaño a ajustar a criterio del cirujano según la anatomía del paciente.


Instrumentación mínima, técnica simplificada

Instrumentación intuitiva

Inserción rápida: perforar, medir, colocar e insertar.
Reposicionamiento y extracción perioperatoria más fáciles.


Solución modular

La instrumentación Arcad® se entrega en módulos específicos, configurados intuitivamente para aplicaciones en el antepié, mediopié y retropié mediante las plataformas de bandeja de esterilización EXACT y COMPLETE, que incluyen los implantes intramedulares Lync, las grapas Arcad®, los tornillos Nexis y los escariadores percutáneos.

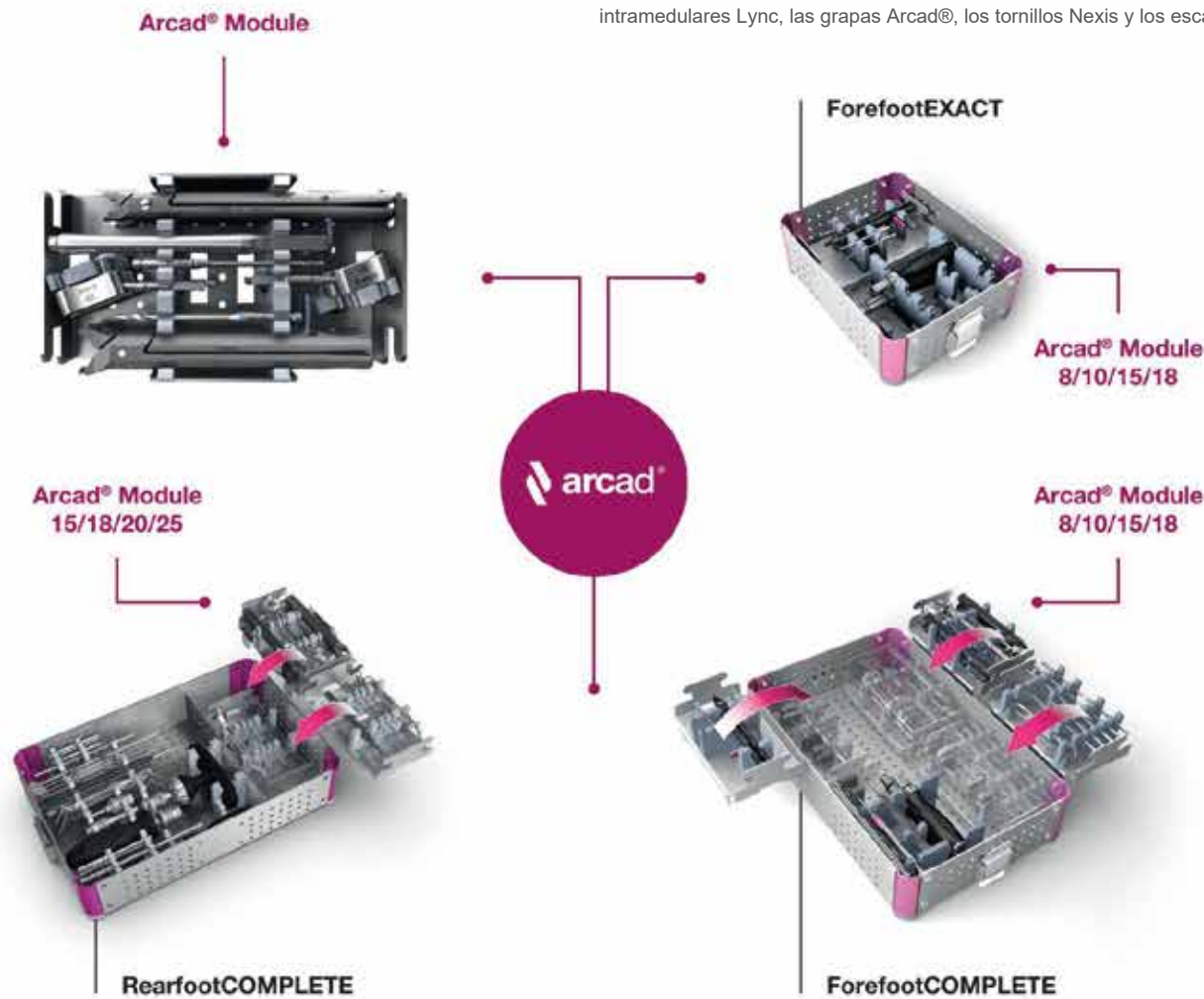

Fórceps Arcad® : ¡Expansión con un solo clic!

Las pinzas Arcad® ofrecen una fuerza de compresión específica para cada tamaño de implante. Las pinzas de implantación para grapas Arcad® cuentan con el exclusivo diseño Lock and Load de Novastep que permite una colocación cómoda y reproducible y una inserción rápida.

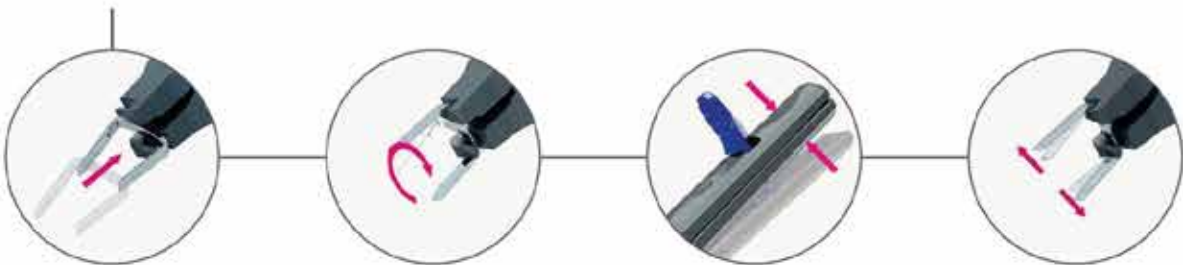

Referencias



Arcad® - Grapas de compresión

Referencias	Descripción	Ancho del puente (mm)	Longitud de la pierna (mm)	Dimensiones del cable (mm)
CS020808	Grapa de compresión 08-08-08	8	8-8	1,2 x 1,5
CS010909	Grapa de compresión 10-09-09	10	9-9	1,2 x 1,5
CS011214	Grapa de compresión 10-12-14	10	12-14	1,2 x 1,5
CS011416	Grapa de compresión 10-14-16	10	14-16	1,2 x 1,5
CS011518	Grapa de compresión 10-15-18	10	15-18	1,2 x 1,5
CS031212	Grapa de compresión 15-12-12	15	12-12	1,3 x 1,8
CS031414	Grapa de compresión 15-14-14	15	14-14	1,3 x 1,8
CS041212	Grapa de compresión 18-12-12	18	12-12	1,3 x 1,8
CS041414	Grapa de compresión 18-14-14	18	14-14	1,3 x 1,8
CS041416	Grapa de compresión 18-14-16	18	14-16	1,3 x 1,8
CS041618	Grapa de compresión 18-16-18	18	16-18	1,3 x 1,8
CS041818	Grapa de compresión 18-18-18	18	18-18	1,3 x 1,8
CS051818	Grapa de compresión 20-18-18	20	18-18	2,5 x 1,6
CS062020	Grapa de compresión 25-20-20	25	20-20	2,5 x 1,6

Además de la gama Arcad®



Una gama de grapas de acero inoxidable rectas y anguladas para osteotomías de varización

Grapas estáticas

Referencias	Descripción
FS010008	Grapa estática 26° - 8 mm
FS010010	Grapa estática 26° - 10 mm
FS010108	Grapa estática 90° - 8 mm
FS010110	Grapa estática 90° - 10 mm

Tenga en cuenta:

Lea atentamente las instrucciones de uso adjuntas y toda la información de la etiqueta del envase. Dispositivos: Implantes: Clase IIb-CE1639 / Instrumentos: Clase I / Clase Ir-CE1639 / Clase IIa-CE1639.

Novastep : 2,

Allée Jacques Frimot - 35000 RENNES - Francia Tel: + 33 (0) 2 99 33 86 50 / Fax: + 33 (0) 9 70 29 18 95 contact@novastep-ortho.com / www.int.novastep .vida

Referencia: Arc-L-Ed6-07-24-ES